

ORTHOPUS SUPPORTER

KURZANLEITUNG

Anleitungsvideos



FARBEN DES KNOPFES AUF DER RÜCKSEITE



FESTER MODUS = BLAU
Fixiert eine gewünschte Höhe

– Runter + Hoch

SPEICHERUNG DER OBER- ODER UNTERGRENZEN

1 LANGER KLICK → **1** → Einstellung einer **Obergrenze** → **2** → Einstellung einer **Untergrenze** → **3** → Rückkehr in den **FESTEN** Modus

Die Ausstattung mit der Fernbedienung in die gewünschte Position bringen

Zum **SPEICHERN**: **1 LANGER KLICK**
Lange Vibration = **OK**

OHNE Speicherung fortfahren:
1 KURZER KLICK

UM MODUS ZU ÄNDERN

FREIER MODUS = GRÜN
Begleitet die Bewegungen

– -100g /klick + +100g /klick

SPEICHERUNG EINER UNTERSTÜTZENDEN KRAFT

1 LANGER KLICK auf den hinteren Knopf
Kurze vibration = **OK**

STANDBY

= WEISS BLINKEND

2 KURZE KLICKS auf den hinteren Knopf, um in den STANDBY-Modus zurückzukehren

PARKPOSITION BEI EINEM ROLLSTUHL

Fahren Sie im **FESTEN Modus** solange runter, bis der ORTHOPUS Supporter auf die Armlehne drückt und blockiert.



Blaues Blinken

des hinteren Knopfes

Aktivierte Parkposition = **OK**

Zum Verlassen der Parkposition drücken Sie die Taste **+** auf der Fernbedienung.

WARTEN AUF DEN FREIEN MODUS



Grünes Blinken

des hinteren Knopfes

Im **FREIEN Modus**, wenn sich kein Arm in der Orthese befindet, wechselt der ORTHOPUS Supporter in die Sicherheitsstellung.

FEHLERMODUS



Klemmen Sie die Ausstattung ab,

warten Sie einige Minuten und schalten Sie sie erneut ein.

Bleibt der hintere Knopf rot, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur medizinischer Geräte.

NUTZUNGSHINWEISE

 Der ORTHOPUS Supporter muss eingeschaltet werden, **ohne** dass sich der Arm in der Orthese befindet und ohne Betätigung der Fernbedienung.

 Vor dem Entfernen des Arms des Nutzers aus der Ausstattung müssen Sie **immer sicherstellen**, dass sich der ORTHOPUS Supporter im Modus FEST oder STANDBY befindet.

 Es wird empfohlen, die **Ausstattung schrittweise einzusetzen** und sich von einer entsprechend qualifizierten medizinischen Fachkraft betreuen zu lassen.

 Nur **eine geschulte Person** darf die Ausstattung einrichten.

Zur uneingeschränkten Nutzung der Funktionen des ORTHOPUS Supporter sollten Sie **auf Folgendes achten**:

 In der horizontalen Position ist der Arm weder nach vorne noch nach hinten geneigt.

 Der Arm ist stets mit der Ellbogenstütze in Kontakt. Speichern Sie bei Bedarf eine Höhenbeschränkung.

 Bei der Verwendung mit einem Rollstuhl müssen die Kabel und das Netzteil sorgfältig auf der Rückseite und vor Regen geschützt aufbewahrt werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN

 Lesen Sie unbedingt das vollständige Benutzerhandbuch des Geräts:
orthopus.com/documentation

 Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf das Gerät an. Lehnen Sie sich beispielsweise nicht darauf. Der ORTHOPUS Supporter ist **ausschließlich dazu bestimmt, den Arm zu stützen**.

 Bei Defekten oder Schäden an elektronischen Komponenten darf das Gerät nicht verwendet werden. **Wenden Sie sich bei Wartungsproblemen an Ihren medizinischen Fachhändler.**

 Verändern Sie keine Teile dieses Geräts, da dies zum Verlust der Garantie führen kann.

 Das Gerät ist spritzwassergeschützt, aber nicht **wasserdicht**. Setzen Sie es keinem starken Regen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Schneefall aus.



Wenn der ORTHOPUS Supporter nicht verwendet wird, muss er stets **in seinem Verpackungskarton aufbewahrt werden**. Diese Verpackung muss im Falle einer Rücksendung der Ausstattung verwendet werden.



Kurzanleitung für den ORTHOPUS
Supporter
v1.2 - 2025/03/04