


ORTHOPUS SUPPORTER

HURTIG BRUGERVEJLEDNING

FARVER PÅ **BAGKNAPPEN**

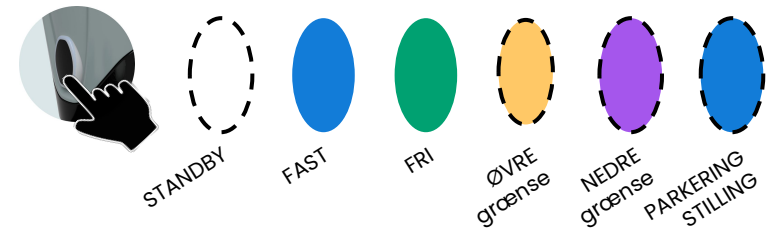

Videovejledninger




FAST TILSTAND = BLÅ
Stabiliserer en valgt højde

+ Op - Ned


GEM ØVRE ELLER NEDRE GRÆNSER



1 LANGT KLIK

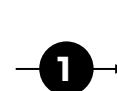

Konfigurer en
øvre grænse

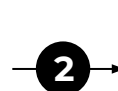

Konfigurer en
nedre grænse



Vend tilbage til
FAST tilstand

Placer enheden i den ønskede position
med fjernbetjeningen

For **at GEMME**: **1 LANGT KLIK**
Lang vibration = **OK**

For at springe over **uden at gemme**:
1 KORT KLIK

STANDBY
= HVIDT
BLINK

2 KORTE KLIK på
bagknappen for at
vende tilbage til
STANDBYTILSTAND

CHANGER DE MODE



LANGT KLIK på de 2
knapper på
fjernbetjeningen

ELLER



1 KORT KLIK på
bagknappen
Kort vibration = **OK**

FRI TILSTAND = GRØN
Følger bevægelser

- -100g /klik + +100g /klik

GEM EN STØTTEKRAFT



1 LANGT KLIK på bagknappen
Kort vibration = **OK**

PARKERINGSSTILLING PÅ KØRESTOL

I **FAST tilstand**, sænk indtil ORTHOPUS Supporteren hviler på armlænet og låser sig fast.



Blå blink
på bagknappen

Parkeringsstilling aktiveret = **OK**

For at forlade parkeringsstillingen, tryk på + knappen på fjernbetjeningen.

VENTETILSTAND FRIMODUS



Grønt blink
på bagknappen

Hvis enheden er skiftet til FRIMODUS uden arm i armstøtten, sætter **ORTHOPUS Supporter** sig selv i sikkerhed.

FEJLMELDINGER



Afbryd enheden og vent et par minutter, før du bruger den igen. Hvis den bageste knap forbliver rød, bedes du kontakte din **ORTHOPUS Supporter** landesrepræsentant.

BRUGSTIPS

i ORTHOPUS Supporteren skal tændes uden en arm i ortosen og **uden** at røre ved fjernbetjeningen.

i Før du fjerner brugerens arm fra støtten, skal du **altid** sikre dig, at ORTHOPUS Supporteren er i FAST tilstand eller i STANDBY.

i Det anbefales at bruge enheden **gradvist** og at blive fulgt af en sundhedsprofessionel.

i Kun en person med den rette **uddannelse er kvalificeret** til at installere enheden.

For at få fuldt udbytte af ORTHOPUS Supporterens funktioner, **skal du sikre dig, at:**

✓ I vandret position hælder armen hverken fremad eller bagud.

✓ Armen altid er i kontakt med albuestøtten. Hvis nødvendigt, skal du gemme en højdegrænse.

✓ Ved brug på kørestol er kabler og strømforsyningsboksen sikkert placeret bagpå og beskyttet mod regn.

VIGTIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

! Du skal læse den fulde brugervejledning for enheden på orthopus.com/fr/documentation

⊖ Anvend ikke overdreven kraft på enheden. For eksempel, læn dig ikke på den. **ORTHOPUS Supporter** er kun designet til at støtte armen.

⊖ Hvis der er fejl eller skader på de elektroniske komponenter, må du ikke bruge enheden. Kontakt din leverandør af medicinsk udstyr for vedligeholdelsesproblemer.

⊖ Ændr ikke nogen del af dette udstyr, da dette kan medføre tab af garantien.

! Enheden er modstandsdygtig over for vandsprøjt, men er ikke vandtæt. Udsæt den ikke for kraftig regn, høj luftfugtighed eller snefald.



ORTHOPUS Supporteren skal altid **opbevares i sin originale emballage**, når den ikke er installeret. Emballagen skal bruges ved returnering af enheden.



Hurtig brugervejledning til ORTHOPUS Supporter
v1.1 - 2023/03/10