


ORTHOPUS SUPPORTER

GUIDE DE USO RÁPIDO

Tutoriales en vídeo




COLORES DEL BOTÓN TRASERO

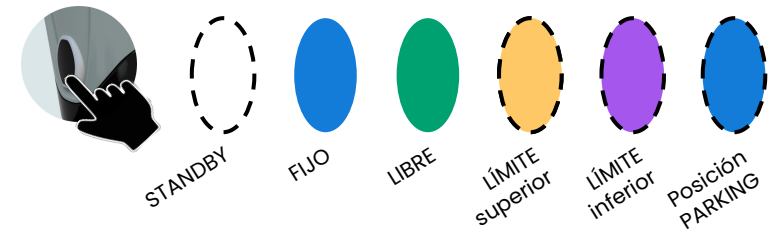

MODO FIJO = AZUL
Estabiliza una altura seleccionada

- bajar + subir

GUARDAR LÍMITES SUPERIORES O INFERIORES

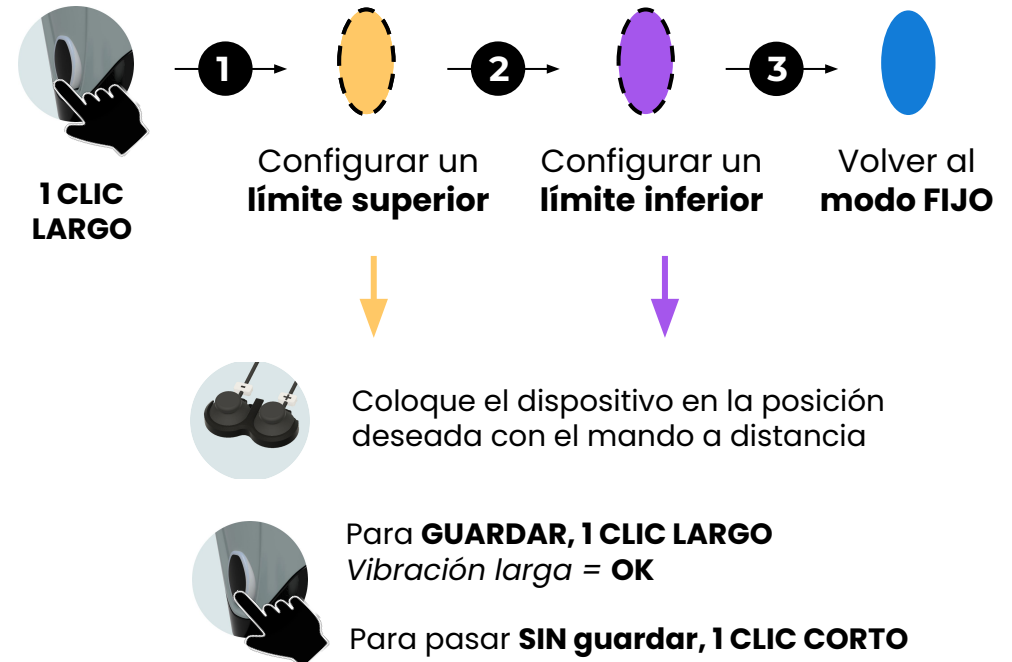

STANDBY = BLANCO INTERMITENTE

2 CLICS CORTOS en el botón trasero para volver al modo STANDBY

CAMBIAR DE MODO

CLIC LARGO en los 2 botones del mando a distancia

1 CLIC CORTO en el botón trasero

Vibración corta = OK

MODO LIBRE = VERDE
Acompaña los movimientos

-100g / clic +100g / clic

GUARDAR UNA FUERZA DE SOPORTE

1 CLIC LARGO en el botón trasero

Vibración corta = OK

POSICIÓN PARKING EN SILLA DE RUEDAS

En **modo FIJO**, baje hasta que el ORTHOPUS Supporter haga contacto con el reposabrazos y quede bloqueado.



Parpadeo azul
del botón trasero

Posición parking activada = OK

Para salir de la posición Parking, presione el botón **+** del mando a distancia.

ESPERANDO MODO LIBRE



Parpadeo verde
del botón trasero

En modo LIBRE, si no hay un brazo instalado en la órtesis, el ORTHOPUS Supporter entra en espera.

MODO ERROR



Desconecte el dispositivo, espere unos minutos y luego vuelva a encenderlo.
Si el botón trasero permanece rojo, contacte con su instalador de material médico.

CONSEJOS DE USO

 LEI ORTHOPUS Supporter debe encenderse **sin que haya** un brazo instalado en la órtesis y sin manipular el mando a distancia.

 Antes de retirar el brazo del usuario del soporte, **asegúrese siempre** de que el ORTHOPUS Supporter esté en modo FIJO o en modo STANDBY.

 Se recomienda **utilizar el dispositivo de manera progresiva** y bajo la supervisión de un profesional sanitario.

 Solo una **persona capacitada** está autorizada para instalar el dispositivo.

Para disfrutar plenamente de las funcionalidades del ORTHOPUS Supporter, **asegúrese de que:**

 En posición horizontal, el brazo no se incline hacia adelante ni hacia atrás.

 El brazo esté siempre en contacto con el soporte del codo. Si es necesario, registre un límite de altura.

 Si se utiliza en una silla de ruedas, los cables y la caja de alimentación estén bien colocados en la parte trasera y protegidos de la lluvia.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

 Debe leer el manual de uso completo del dispositivo: orthopus.com/documentation

 No aplique una fuerza excesiva sobre el dispositivo. Por ejemplo, no se apoye en él. **El ORTHOPUS Supporter está diseñado únicamente para soportar el brazo.**

 En caso de defectos o daños en los componentes electrónicos, no utilice el dispositivo. **Contacte a su instalador de material médico** para cualquier problema de mantenimiento.

 **No modifique ninguna parte de este equipo**, ya que esto puede provocar la pérdida de la garantía.

 El dispositivo es resistente a salpicaduras de agua, pero **no es impermeable**. No lo exponga a lluvias intensas, alta humedad ambiental o nieve.



El ORTHOPUS Supporter debe guardarse **siempre en su caja de embalaje cuando no esté instalado**. Este embalaje deberá utilizarse en caso de devolución del dispositivo.



Guía de uso rápido del
ORTHOPUS Supporter
v1.2 - 2025/03/04