


ORTHOPUS SUPPORTER

GUIDE DE UTILIZAÇÃO RÁPIDA

Vídeos
tutoriais



CORES DO BOTÃO TRASEIRO

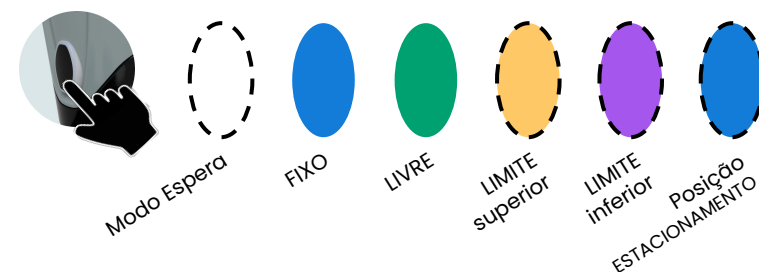

MODO FIXO = AZUL

Estabiliza uma altura escolhida

-
descer

+
subir

GRAVAR LIMITES SUPERIORES OU INFERIORES



1
CLIQUE
LONGO

1
Configurar um
limite superior

2
Configurar um
limite inferior

3
Voltar ao
modo FIXO

Coloque o dispositivo na posição
desejada com o comando

Para **GRAVAR**, 1 CLIQUE LONGO
Vibração longa = **OK**

Para passar **SEM gravar**, 1 CLIQUE CURTO

MODO ESPERA
= BRANCO
INTERMITENTE

2 CLIQUES CURTOS
no botão traseiro
para voltar ao
modo espera

MUDAR DE MODO



CLIQUE LONGO nos 2
botões do comando

OU



1 CLIQUE CURTO no
botão traseiro
Vibração curta = **OK**

MODO LIVRE = VERDE

Acompanha os movimentos

-
-100g /clique

+
+100g /clique

GRAVAR UMA FORÇA DE APOIO



1 CLIQUE LONGO no botão traseiro
Vibração curta = **OK**

POSIÇÃO ESTACIONAMENTO NA CADEIRA

No **modo FIXO**, desça até que o ORTHOPUS Supporter pressione o apoio de braço e fique bloqueado.



Piscar azul do botão traseiro

*Posição de estacionamento
ativada = OK*

Para sair da posição Estacionamento, pressione o botão **+** do comando.

A AGUARDAR NO MODO LIVRE



Piscar verde
do botão traseiro

No modo LIVRE, se não houver um braço pousado na órtese, o ORTHOPUS Supporter entra em modo de segurança.

MODO DE ERRO



Desligue o dispositivo, aguarde alguns minutos e depois ligue-o novamente.
Se o botão traseiro continuar vermelho, contacte o seu instalador de material médico.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

 O ORTHOPUS Supporter deve ser ligado **sem** o braço pousado na órtese e sem tocar no comando.

 Antes de retirar o braço do utilizador do suporte, **verifique sempre** que o ORTHOPUS Supporter está no modo FIXO ou em ESPERA.

 É aconselhável **utilizar o dispositivo de forma progressiva** e ser acompanhado por um profissional de saúde.

 Apenas **uma pessoa treinada** está habilitada a instalar o dispositivo.

Para tirar o máximo partido das funcionalidades do ORTHOPUS Supporter, **certifique-se de que:**

 Na posição horizontal, o braço não está inclinado nem para a frente nem para trás.

 O braço está sempre em contacto com o suporte de cotovelo. Se necessário, grave um limite de altura.

 Ao usar numa cadeira, os cabos e a caixa de alimentação estarem devidamente acondicionados na parte traseira e protegidos da chuva.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

 Deve ler **atentamente o manual completo de utilização do dispositivo:** orthopus.com/documentation

 Não aplique força excessiva no dispositivo. Por exemplo, não se apoie sobre ele. **O ORTHOPUS Supporter destina-se exclusivamente a apoiar o braço.**

 Em caso de defeitos ou danos nos componentes eletrónicos, não utilize o dispositivo. **Contacte o seu instalador de material médico** para qualquer questão de manutenção.

 **Não modifique nenhuma parte deste equipamento**, sob pena de perda da garantia.

 O dispositivo é resistente a salpicos de água, mas **não é à prova de água**. Não o exponha a chuva intensa, elevada humidade ou neve.



O ORTHOPUS Supporter deve ser sempre **guardado na sua caixa de embalagem** quando não estiver instalado. Esta embalagem deve ser utilizada em caso de devolução do dispositivo.



*Guia de utilização rápida do
ORTHOPUS Supporter
v1.2 - 2025/03/04*