

ORTHOPUS ARMSTØTTE

HURTIGOVERSIGT




Placeringen af **både armskålen og albustøtten er afgørende** for at sikre korrekt funktion af ORTHOPUS-enheden.

FORKERT PLACERING




❌ Armskål placeret **for tæt på håndledet eller albuen**

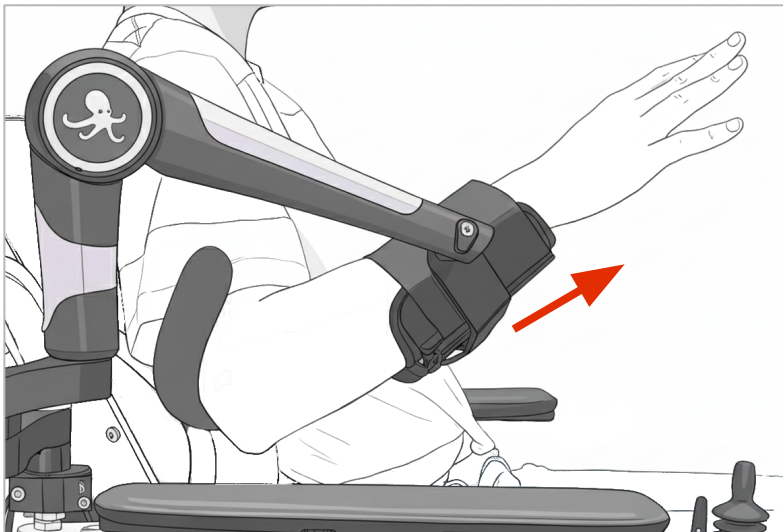


❌ Armen er **ikke justeret** med armstøtten.
Den bør justeres under installationen.

KORREKT PLACERING

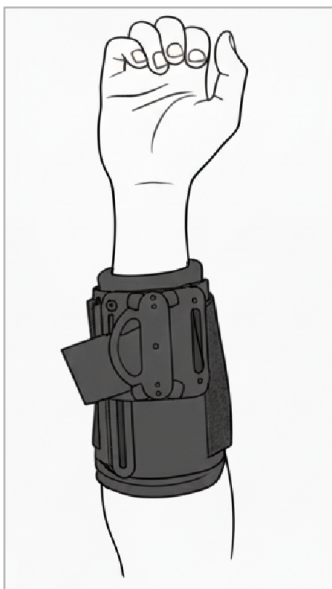


✅ Armskålen er **korrekt placeret**

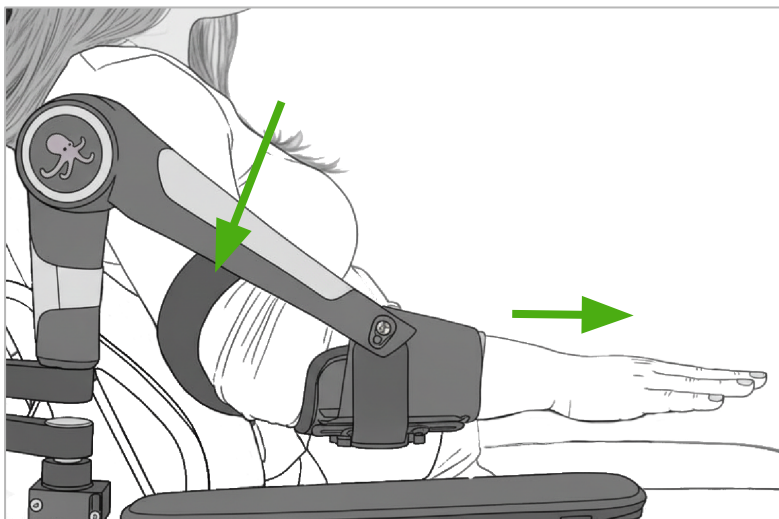

✅ Armen vender **tilbage til en vandret hvileposition** efter bevægelse


✅ Albustøtten er **drejet opad** for at sikre en tæt og stabil pasform

SÅDAN FASTGØRES ARMSKÅL & ALBUSTØTTE

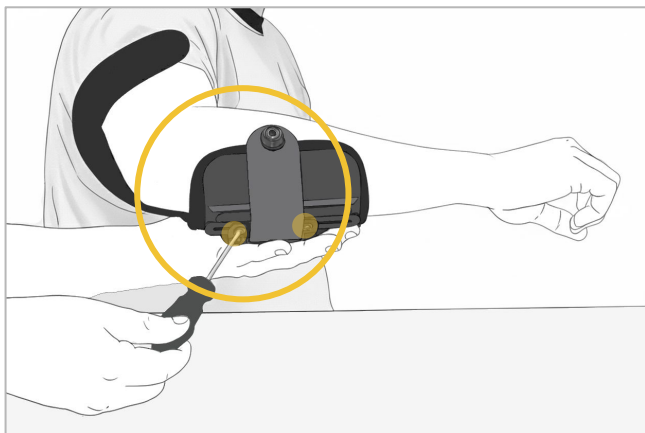

2 ydre skruer


→ til fastgørelse af armskålens position

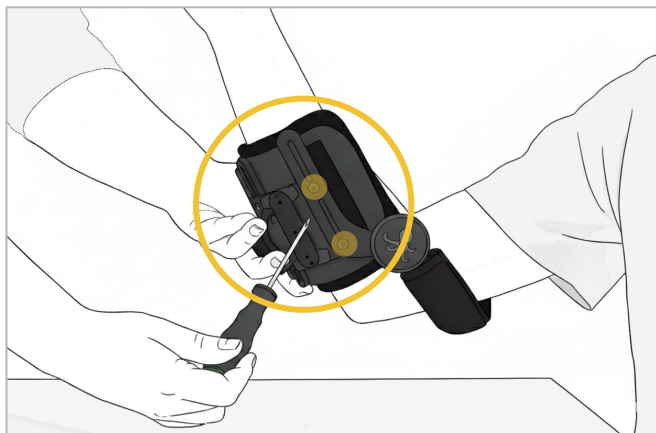


2 indre skruer

→ til fastgørelse af albustøttens position

SÅDAN JUSTERES ALBUSTØTTEN

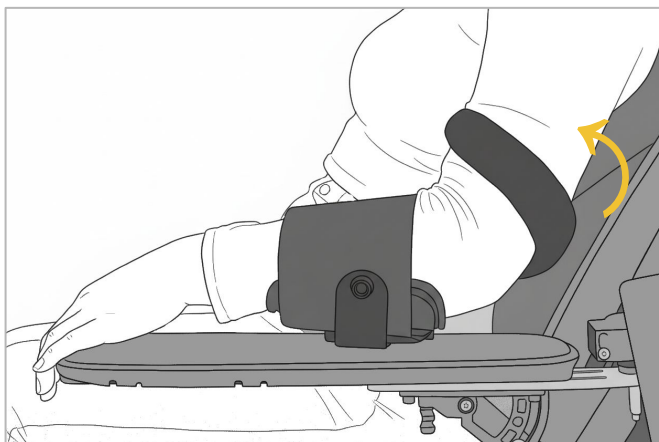

Drej albustøtten for at skubbe den **opad**.
Den flade del skal have **fuld kontakt**
med armen.

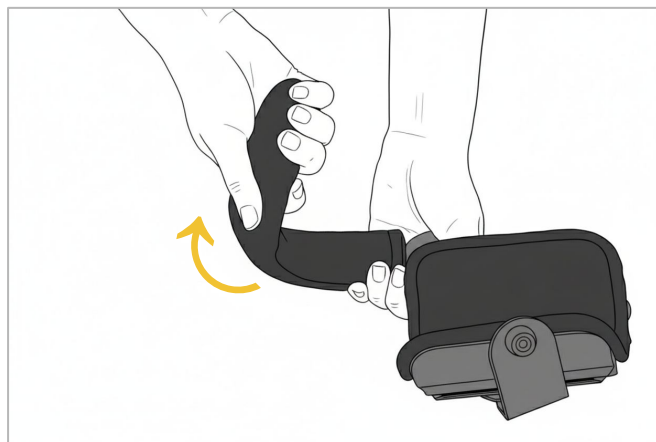

Du er velkommen til at fjerne brugerens
arm fra armstøtten for at gøre
justeringen nemmere.



Alle **detaljerede oplysninger om ORTHOPUS-armstøtten (4 størrelser, justeringsmuligheder)** findes i brugsanvisningen i ORTHOPUS-emballagen eller på orthopus.com/documentation



Scan denne QR-kode for at se vores **VIDEO-TUTORIAL – Installation og justering af armstøtten** (7 min).



ORTHOPUS – orthopus.com – usercare@orthopus.com