


ÓRTESIS ORTHOPUS

GUÍA RÁPIDA




La posición tanto de la **cuna del antebrazo como del soporte del codo es fundamental** para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo ORTHOPUS.

POSICIONAMIENTO INCORRECTO

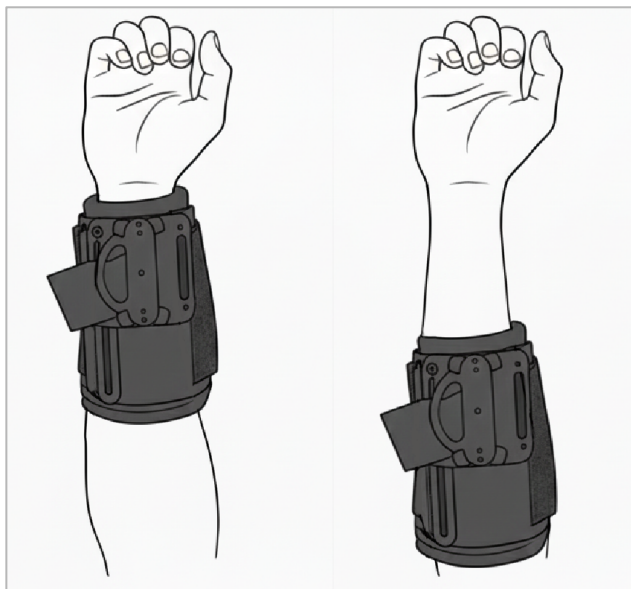


❌ La cuna del antebrazo **está demasiado cerca de la muñeca o del codo**

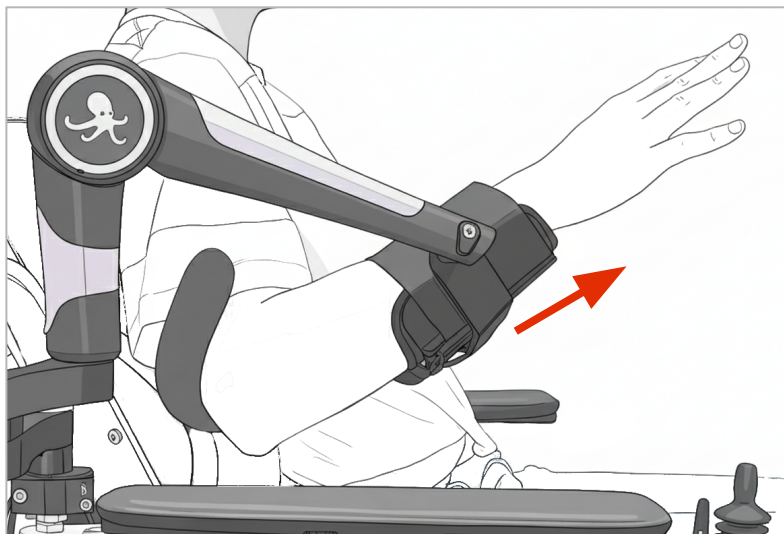


❌ El brazo **no está alineado** con el reposabrazos de la silla de ruedas. Debe estar alineado durante la instalación.

POSICIONAMIENTO CORRECTO

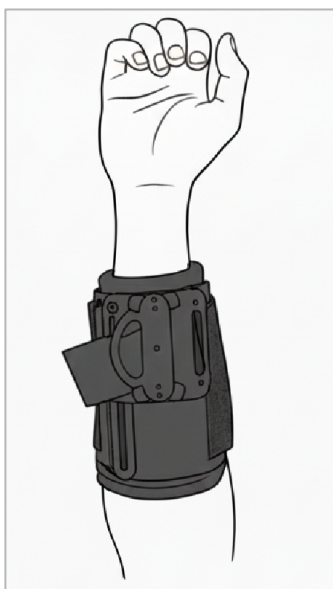


✅ Cuna del antebrazo **correctamente posicionada**

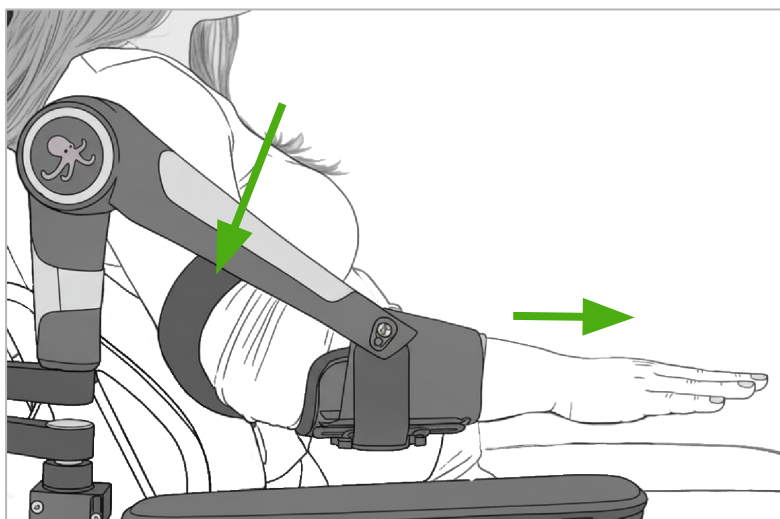

✅ El brazo vuelve **a una posición de reposo horizontal** después del movimiento


✅ Soporte del codo **girado hacia arriba** para garantizar un ajuste firme y cómodo

CÓMO FIJAR LA CUNA DEL ANTEBRAZO Y EL SOPORTE DEL CODO

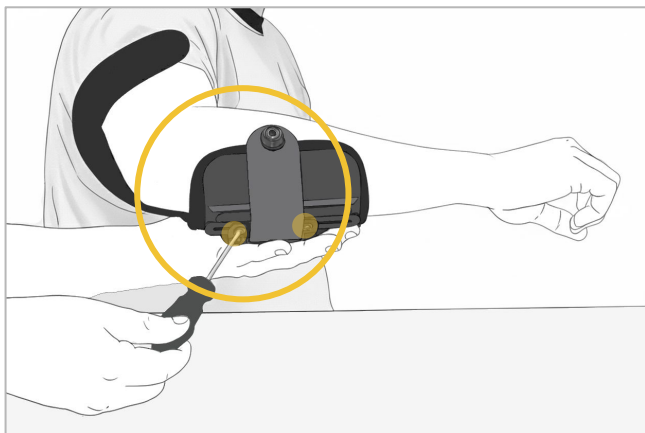

2 tornillos exteriores


→ para fijar la posición de la cuna del antebrazo

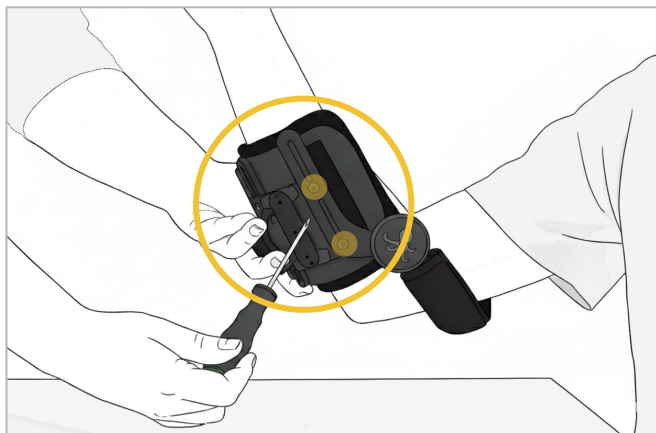


2 tornillos interiores

→ para fijar la posición del soporte del codo

CÓMO AJUSTAR EL SOPORTE DEL CODO

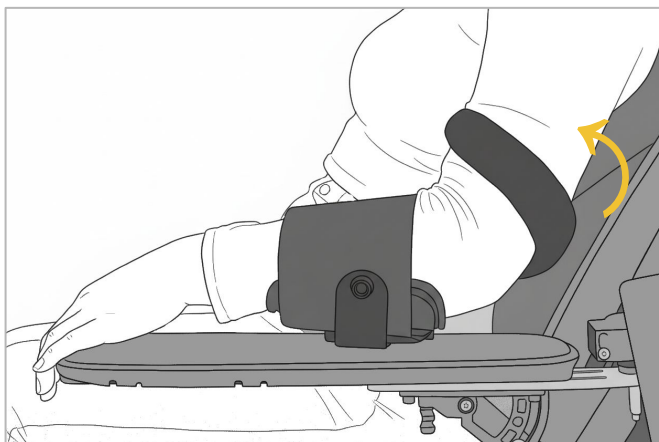

Gire el soporte del codo para empujarlo hacia arriba. La parte plana debe estar **en contacto total** con el brazo.

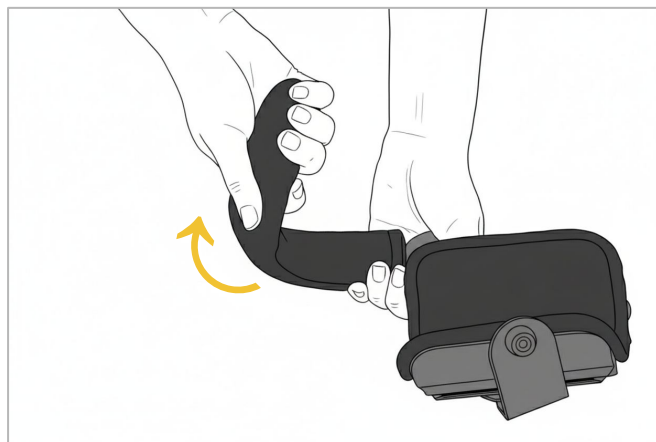

No dude en retirar el brazo del usuario de la órtesis para facilitar el ajuste.



Encontrará **toda la información detallada sobre la órtesis de brazo ORTHOPUS (4 tallas, ajustes)** en las Instrucciones de Uso incluidas en la caja del embalaje ORTHOPUS o en orthopus.com/documentation



Escanee este código QR para ver nuestro **VÍDEO TUTORIAL – Instalación y ajuste de la órtesis** (7 min).



ORTHOPUS – orthopus.com – usercare@orthopus.com