


ORTHÈSE ORTHOPUS

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE




La position de la gouttière et du support de coude est **cruciale** pour garantir le bon fonctionnement de l'ORTHOPUS Supporter.

POSITIONNEMENT INCORRECT

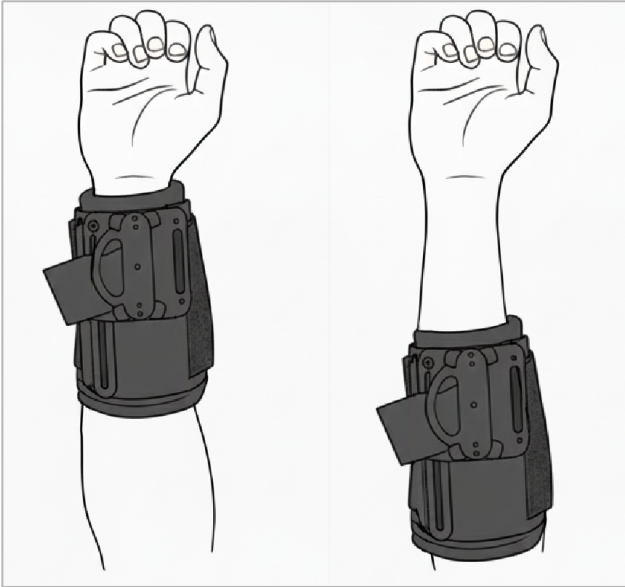


❌ Gouttière **trop proche** du poignet ou du coude

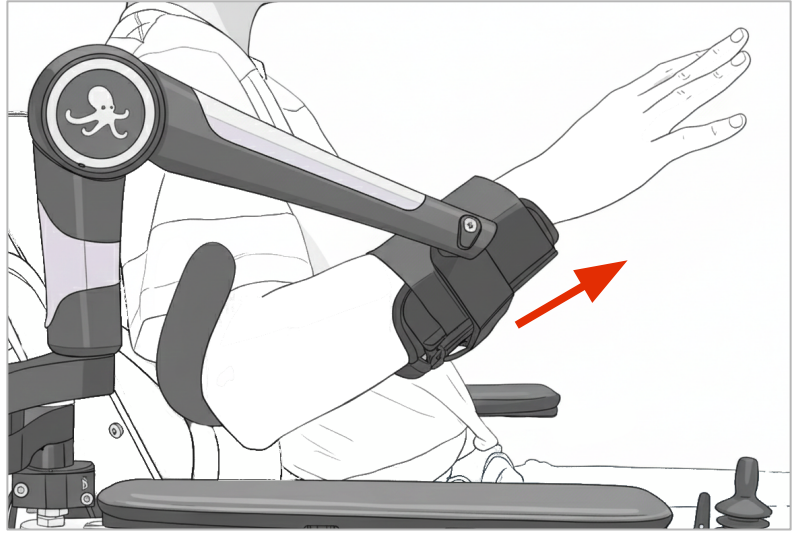


❌ Le bras n'est **pas aligné** avec l'accoudoir. Il doit l'être au repos durant les réglages.

POSITIONNEMENT CORRECT

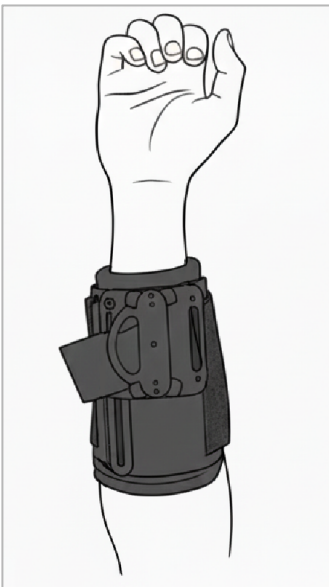


✅ Gouttière **correctement positionnée**

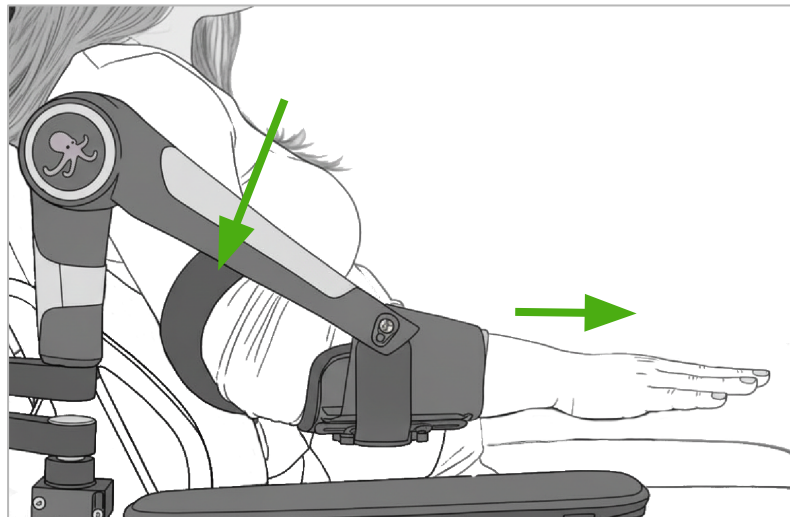

✅ Le bras **revient à une position de repos horizontale** après le mouvement


✅ Le support de coude est **tourné vers le haut** pour assurer un maintien ferme et confortable

RÉGLER LA POSITION DE LA GOUTTIÈRE ET DU SUPPORT DE COUDE

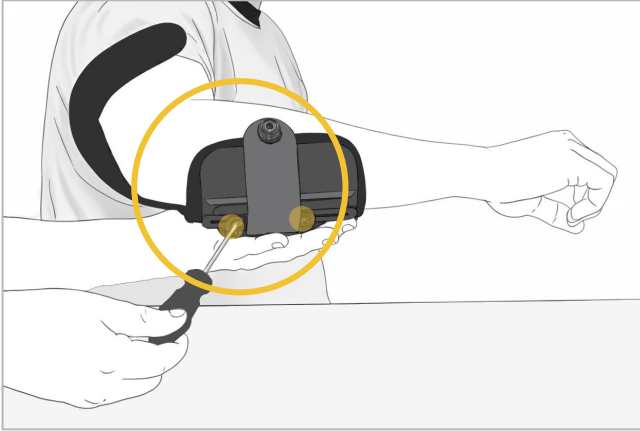

2 vis extérieures


→ pour régler la position de la gouttière

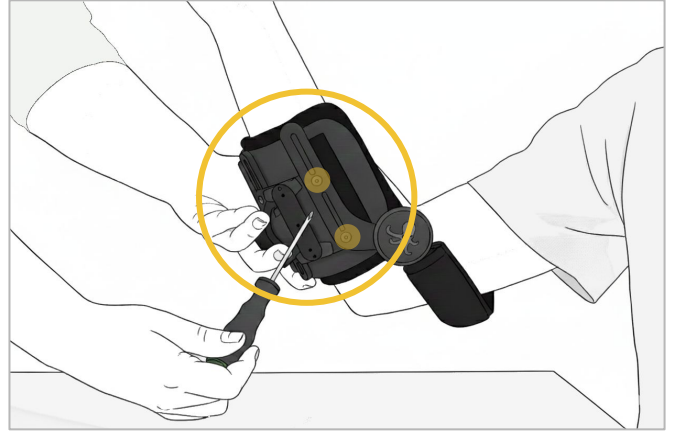


2 vis intérieures

→ pour régler la position du support de coude

AJUSTER LE SUPPORT DE COUDE

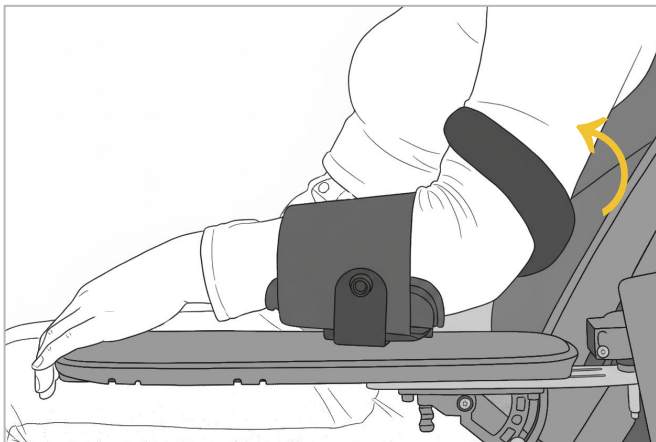

Tordez le support de coude **vers le haut**.
La partie plate doit être **en contact complet** avec le bras.

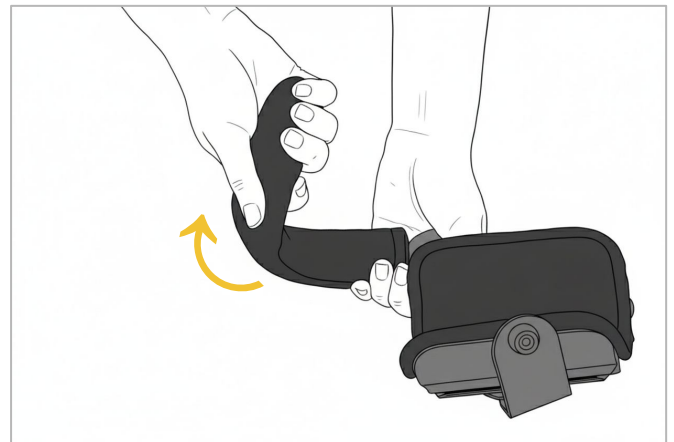

N'hésitez pas à retirer le bras de l'utilisateur de l'orthèse pour faciliter le réglage.



Retrouvez toutes les informations détaillées concernant l'orthèse de bras ORTHOPUS (4 tailles, réglages) dans la notice d'utilisation fournie dans le carton ou sur orthopus.com/fr/documentation



Scannez ce QR code pour visionner notre
VIDÉO TUTORIEL – Installation et réglage de l'orthèse (7 min).



ORTHOPUS – orthopus.com – usercare@orthopus.com