


ORTHOPUS ARMSTEUN

SNELLE OVERZICHT




De positie **van zowel de armschaal als de elleboogsteun is essentieel** om een goede werking van het ORTHOPUS-apparaat te garanderen.

ONJUISTE POSITIONERING

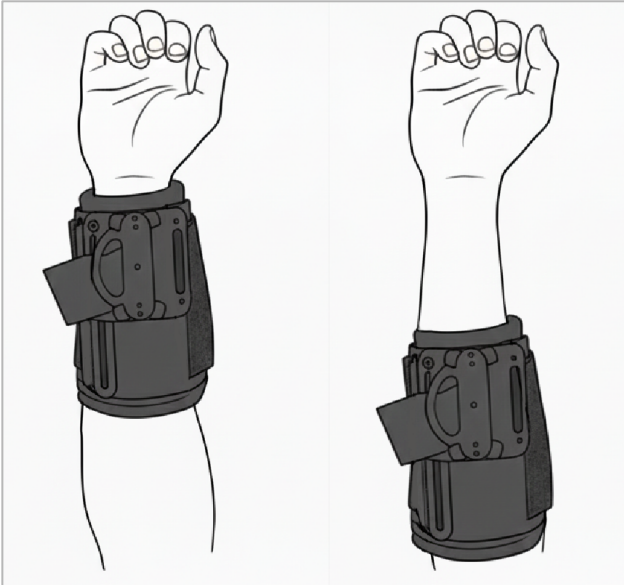


❌ Armschaal **te dicht bij de pols of de elleboog**

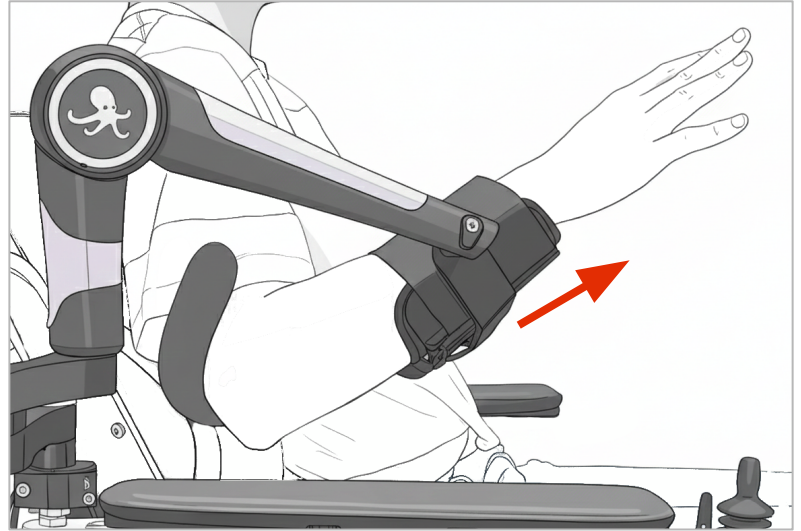


❌ Arm **niet uitgelijnd** met de armsteun. Hij moet tijdens de installatie worden uitgelijnd.

JUISTE POSITIONERING

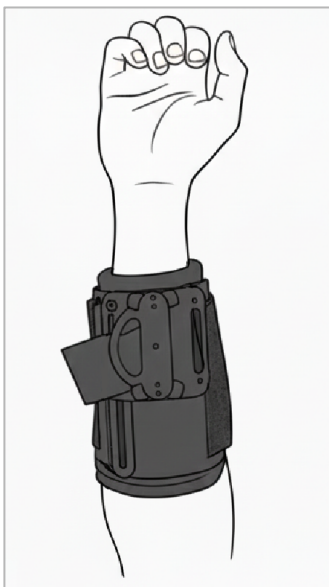


✅ Armschaal **correct gepositioneerd**

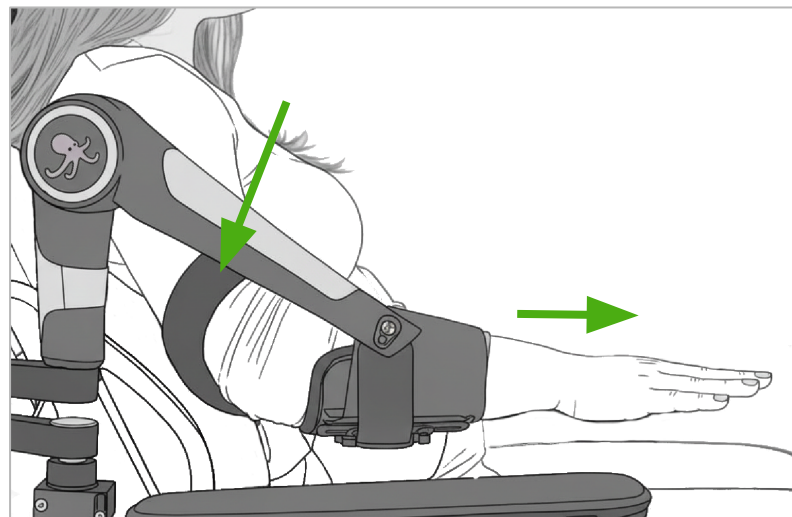


✅ Arm keert na beweging **terug naar een horizontale rustpositie**

✅ Elleboogsteun **omhoog gedraaid** om een goede en stevige pasvorm te garanderen

HOE DE ARMSCHAAL & ELLEBOOGSTEUN TE BEVESTIGEN

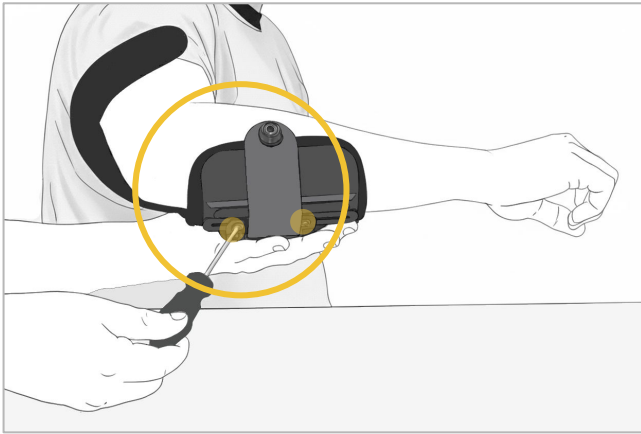


2 buitenste schroeven
→ om de positie van de armschaal
vast te zetten

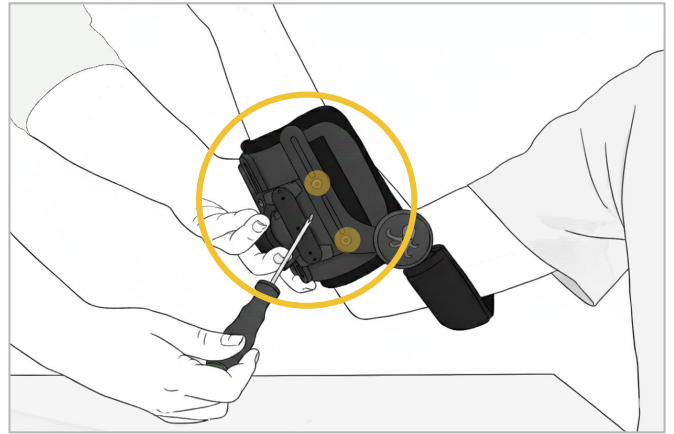


2 binnenste schroeven
→ om de positie van de elleboogsteun
vast te zetten

HOE DE ELLEBOOGSTEUN AAN TE PASSEN

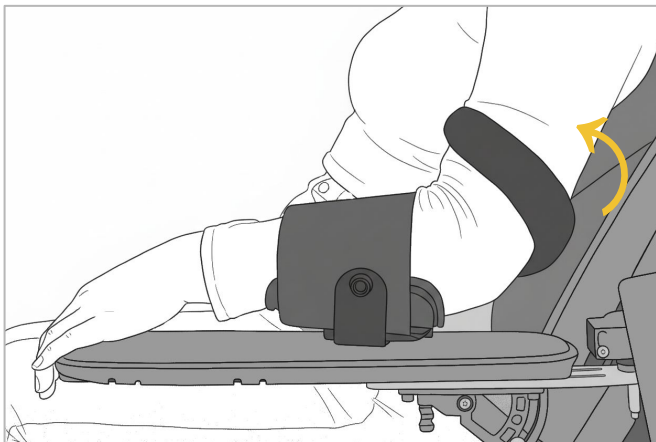

Draai de elleboogsteun om deze **omhoog**
te duwen. Het vlakke gedeelte moet
volledig contact maken met de arm.

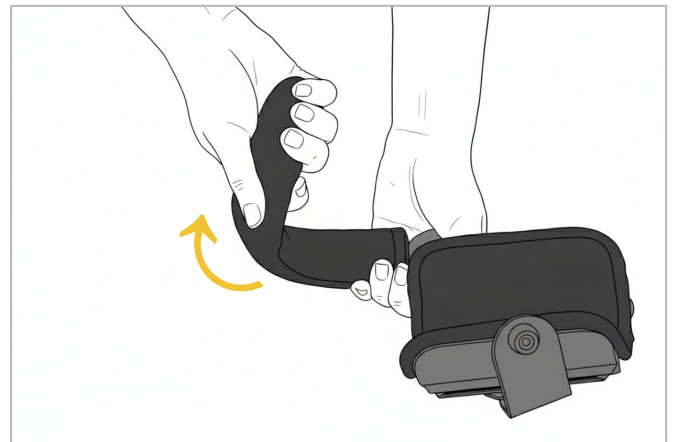

Aarzel niet om de arm van de gebruiker
uit de armsteun te halen om dit
gemakkelijker te doen.



Alle **gedetailleerde informatie over de ORTHOPUS-armsteun (4 maten, afstellingen)** is te vinden in de gebruiksaanwijzing in de ORTHOPUS-verpakkingsdoos, of op orthopus.com/documentation



Scan deze QR-code om onze **VIDEO-TUTORIAL – Installatie en afstelling van de armsteun (7 min)** te bekijken.

