


ORTHOPUS ARMSTØTTE

HURTIGOVERSIKT




Plasseringen **av både armskålen og albustøtten** er **avgjørende** for å sikre korrekt funksjon av ORTHOPUS-enheten.

FEIL PLASSERING

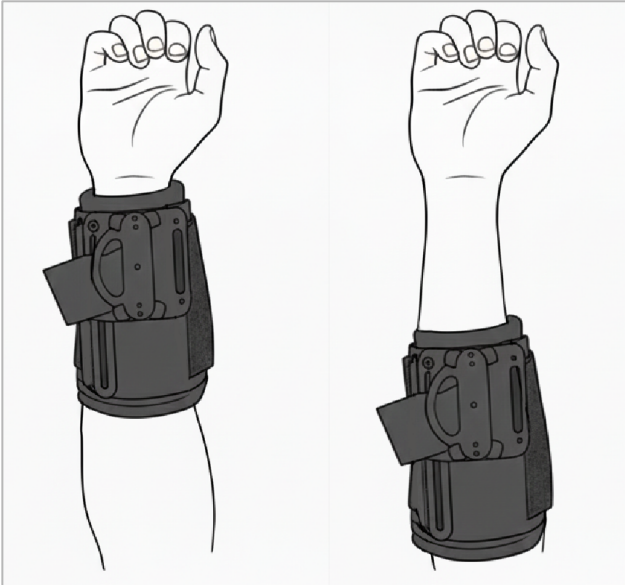


❌ Armskålen **er plassert for nær håndleddet eller albuen**

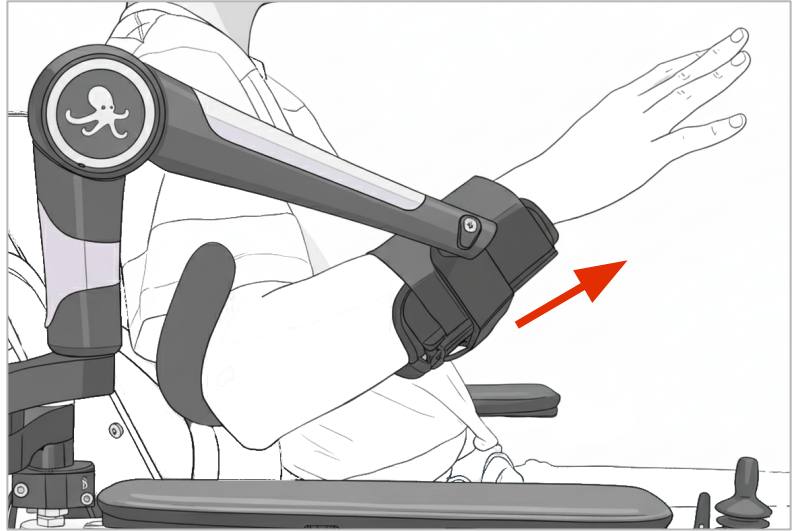


❌ Armen **er ikke justert** med armstøtten.
Den bør justeres under installasjonen.

KORREKT PLASSERING

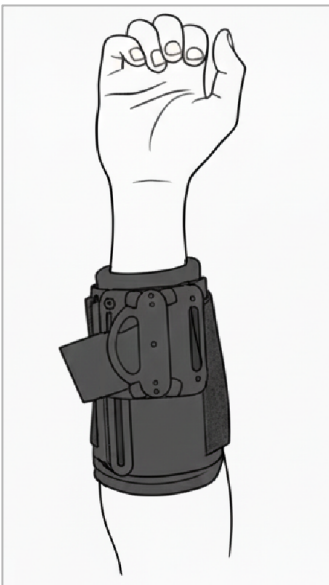


✅ Armskålen er **riktig plassert**

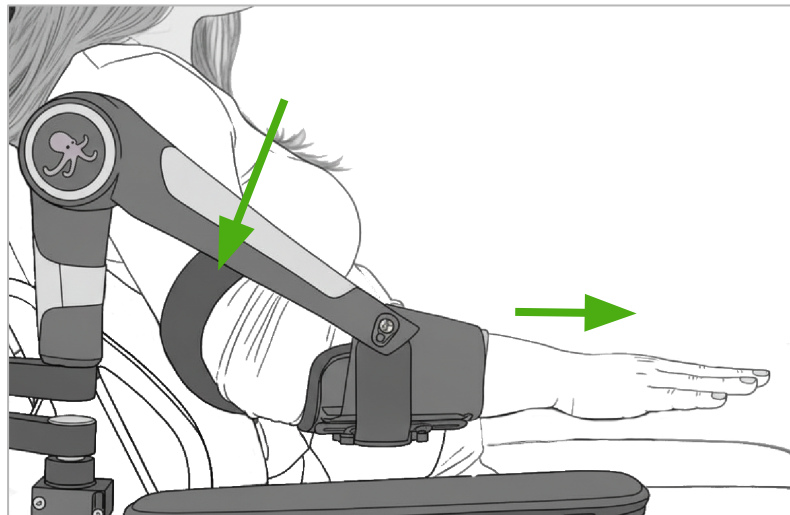

✅ Armen returnerer **til en horisontal hvileposisjon** etter bevegelse


✅ Albustøtten er **vridd oppover** for å sikre en tett og stabil passform

HVORDAN FESTE ARMSKÅL OG ALBUSTØTTE

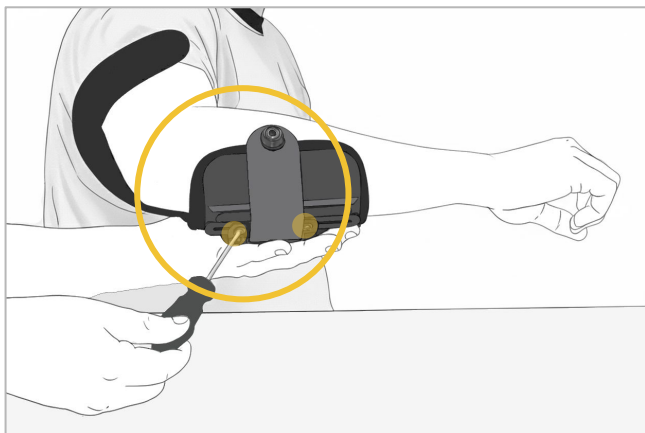

2 ytre skruer


→ for å feste plasseringen av armskålen

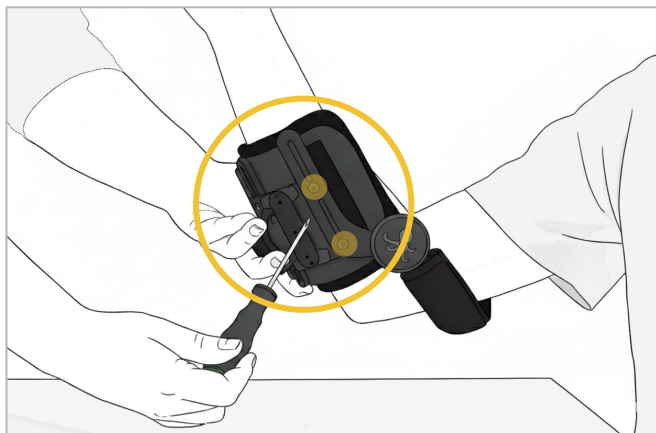


2 indre skruer

→ for å feste plasseringen av albustøtten

HVORDAN JUSTERE ALBUSTØTTE

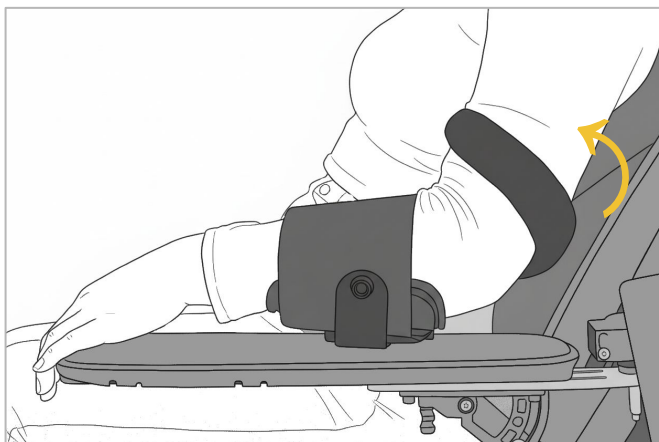

Vri albustøtten for å skyve den **oppover**.
Den flate delen må være i **full kontakt** med armen.

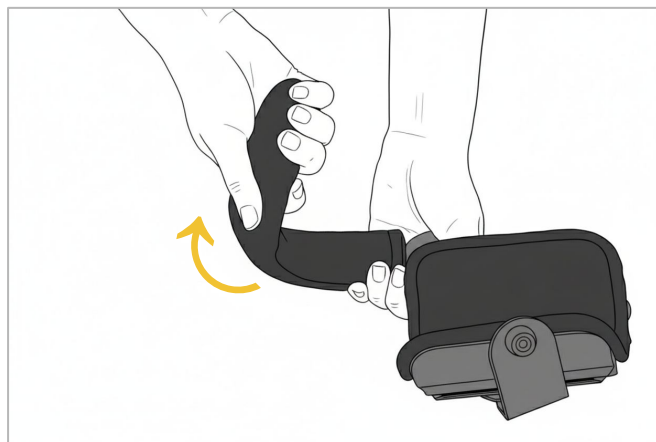

Du kan gjerne ta brukerens arm ut av armstøtten for å gjøre dette enklere.



Du finner **all detaljert informasjon om ORTHOPUS-armstøtten (4 størrelser, justeringer)** i bruksanvisningen i ORTHOPUS-emballasjen, eller på orthopus.com/documentation



Skann denne QR-koden for å se vår **VIDEOVEILEDNING – Installasjon og justering av armstøtten** (7 min).



ORTHOPUS – orthopus.com – usercare@orthopus.com