


ÓRTESE DE BRAÇO ORTHOPUS

GUIA RÁPIDO




A posição tanto **do apoio do antebraço como do suporte do cotovelo é fundamental** para garantir o bom funcionamento do dispositivo ORTHOPUS.

POSICIONAMENTO INCORRETO

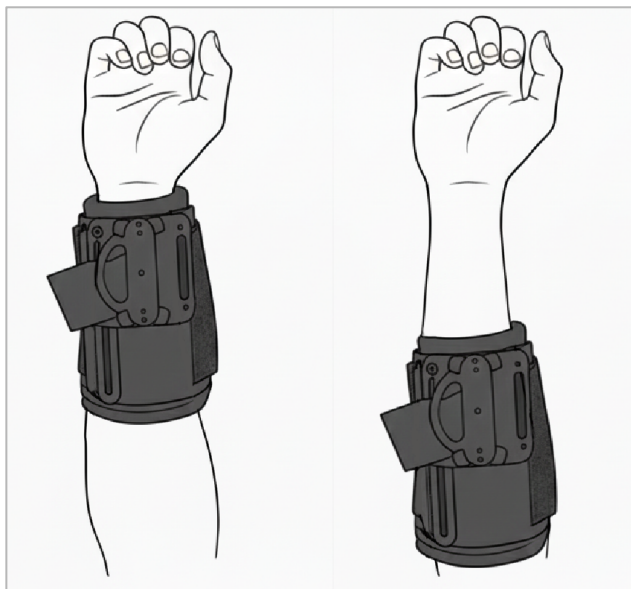


❌ Apoio do antebraço **demasiado próximo do pulso ou do cotovelo**

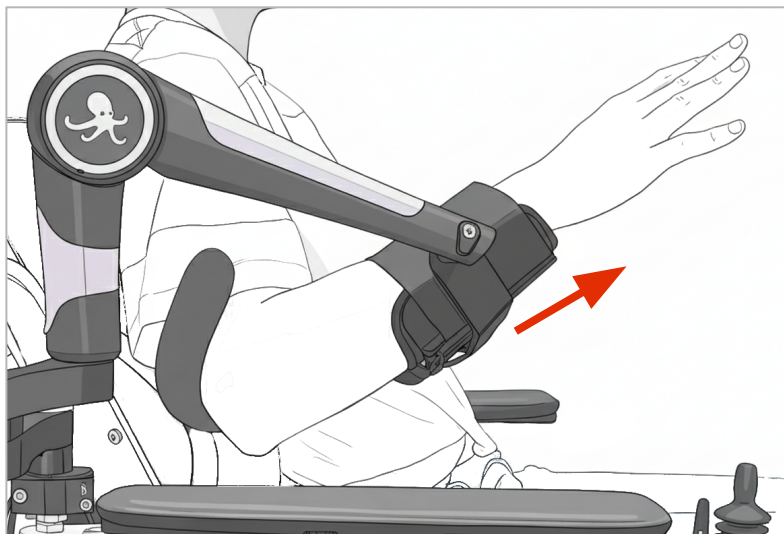


❌ Braço **não alinhado** com o apoio de braço da cadeira de rodas. Deve estar alinhado durante a instalação.

POSICIONAMENTO CORRETO

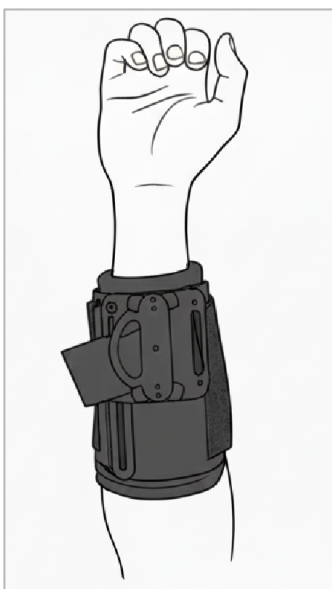


✅ Apoio do antebraço **corretamente posicionado**

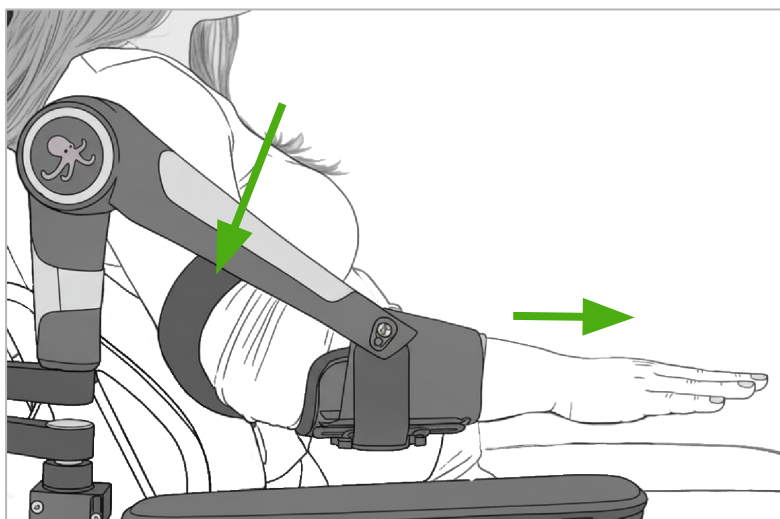


✅ O braço regressa **a uma posição de repouso horizontal** após o movimento

✅ Suporte do cotovelo **rodado para cima** para garantir um ajuste firme e confortável

COMO FIXAR O APOIO DO ANTEBRAÇO E O SUPORTE DO COTOVELO

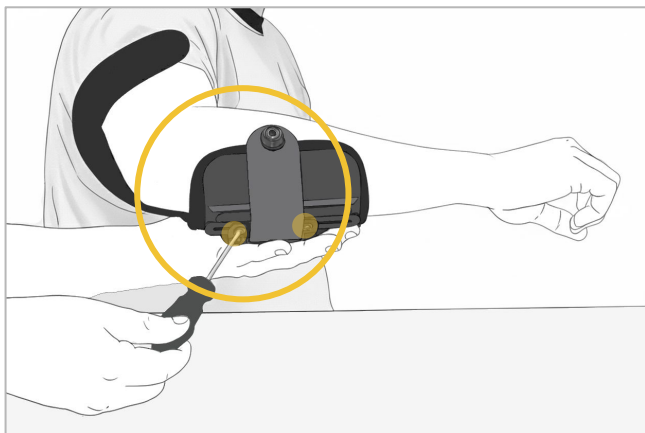


2 parafusos exteriores
→ para fixar a posição do apoio do antebraço

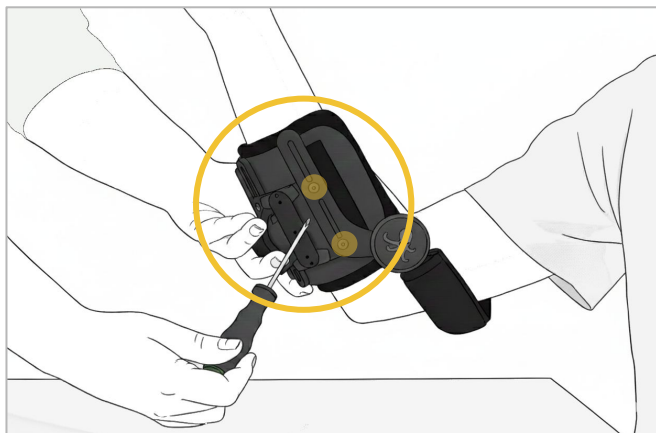


2 parafusos interiores
→ para fixar a posição do suporte do cotovelo

COMO AJUSTAR O SUPORTE DO COTOVELO

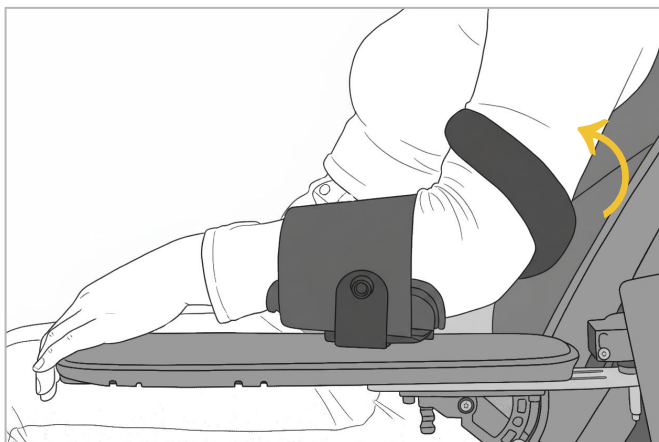

Rode o suporte do cotovelo para o empurrar **para cima**. A parte plana deve estar **em contacto total** com o braço.

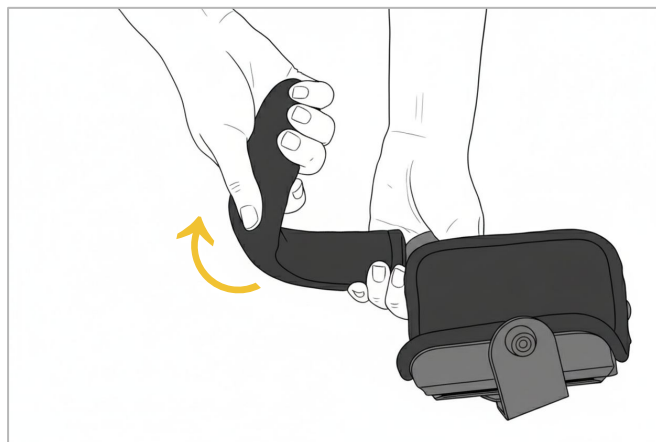

Sinta-se à vontade para retirar o braço do utilizador da órtese para facilitar este ajuste.



Toda a **informação detalhada sobre a órtese de braço ORTHOPUS (4 tamanhos, ajustes)** encontra-se nas Instruções de Utilização incluídas na embalagem ORTHOPUS ou em orthopus.com/documentation



Digitalize este código QR para ver o nosso **VÍDEO TUTORIAL – Instalação e ajuste da órtese** (7 min).



ORTHOPUS - orthopus.com - usercare@orthopus.com